



پروتکل نحوه ارسال نمونه آمنیون

نحوه تهیه نمونه آمنیون

ترجیحاً ۲ سرنگ هر کدام ۱۰ سی سی گرفته شود. مقادیر کمتر از ۱۰ سی سی ممکن است به نتیجه نرسند. ترجیحاً نمونه برداری در سرنگ‌های یکسان انجام شود. جهت جلوگیری از آلودگی نمونه با سلول‌های مادری چند قطره آمنیون تهیه شده اولیه خالی گردد.

نکته: احتمال آلودگی با سلول‌های مادری و یا عدم رشد در نمونه‌های کدر و خونی افزایش می‌یابد. لطفاً از هر گونه دستکاری سرنگ‌ها (خم کردن یا برداشتن سوزن، برداشتن کلاهک، شکستن پیستون و...) خودداری فرمائید.

شرایط نمونه برداری

بهترین زمان جهت انجام آزمایش کشت و مطالعه کروموزومی روی مایع آمنیوتیک بین ۱۵ الی ۱۸ هفته بارداری می‌باشد و امکان عدم رشد در نمونه‌های بالای ۲۰ هفته بارداری افزایش می‌یابد.

نکته: زودتر از ۱۵ هفته بارداری نمونه برداری انجام نشود.

مشخصات الزامی

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد مادر، هفته بارداری و در صورت وجود، شماره پذیرش در مرکز کریمی نژاد-نجم آبادی روی سرنگ یا لوله فالكون ثبت گردد.

مدارک مورد نیاز

مدارک لازم برای انجام آزمایش آخرین سونوگرافی، تست‌های غربالگری، آزمایشات قبل از بارداری، خلاصه پرونده پزشکی و نسخه پزشک می‌باشد.

شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز

حداکثر ۲۴ ساعت دمای یخچال

سرنگ‌ها یا لوله‌های فالكون را داخل فلاسک قرار دهید.

در فصل گرما Ice pack (بسته‌های یخ) را در داخل فلاسک قرار داده به طوری که یونولیت بین سرنگ‌ها و بسته یخ خشک قرار گیرد. **به هیچ عنوان نمونه‌های مایع آمنیوتیک در مجاورت مستقیم با یخ نباشند.** در فصل سرما احتیاجی به استفاده از Ice pack (بسته‌های یخ) نمی‌باشد.

بازه زمانی تحویل

ساعت تحویل نمونه‌ها در روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ الی ۱۷ و پنجشنبه‌ها ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر می‌باشد.

