



پروتکل نحوه تهیه و ارسال نمونه پرز جفتی (CVS)

نحوه تهیه نمونه پرز جفتی:

مقدار نمونه مورد نیاز حداقل ۱۰ میلی گرم پرز می‌باشد. نمونه CVS باید در شرایط کاملاً استریل، زیر هود پاک شده پس از قرار دادن نمونه داخل لوله فالکون و پر کردن لوله با محلول RPMI ، Ham F10 و یا هر محیط کشت در دسترس (جهت جلوگیری از چسبندگی پرزها به جدار لوله در حین حمل و نقل، لوله با محلول کاملاً پر شود) درب لوله فالکون با پارافیلیم بسته شود. لطفاً از هر گونه دستکاری سرنگ‌ها (خم کردن یا برداشتن نیدل، برداشتن کلاهک، شکستن پیستون و...) خودداری فرمائید.

شرایط نمونه برداری:

بهترین زمان جهت انجام کشت و مطالعه کروموزومی CVS بین ۱۱ الی ۱۳ هفته بارداری می‌باشد. نمونه برداری قبل از هفته ۱۰ به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

مشخصات الزامی:

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد مادر، هفته بارداری و در صورت وجود، شماره پذیرش در مرکز کریمی نژاد-نجم آبادی روی سرنگ یا لوله فالکون ثبت گردد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم برای انجام آزمایش آخرین سونوگرافی، تست‌های غربالگری، آزمایشات قبل از بارداری، خلاصه پرونده پزشکی و نسخه پزشک می‌باشد.

شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز:

حداکثر ۲۴ ساعت دمائی یخچال

سرنگ‌ها یا لوله‌های فالکون را داخل فلاسک قرار دهید.

در فصل گرما Ice pack (بسته‌های یخ) را در داخل فلاسک قرار داده به طوری که یونولیت بین سرنگ‌ها و بسته یخ خشک قرار گیرد. به هیچ

عنوان نمونه‌های پرز جفتی در مجاورت مستقیم با یخ نباشند. در فصل سرما احتیاجی به استفاده از Ice pack (بسته‌های یخ) نمی‌باشد.

بازه زمانی تحویل:

ساعت تحویل نمونه‌ها در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۷ عصر و روزهای پنجشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر می‌باشد.

